

KAVO

UNIQA

Die neue Premium-
Kompaktklasse.



KAVO
Dental Excellence

YOUNIQUE – weil es um Sie geht.

Die moderne Zahnarztpraxis ist mehr als der Ort, an dem eine Zahnbehandlung stattfindet.

Sie wird zum Ausdruck der individuellen Persönlichkeit von Zahnärzt*innen – Design, Ausstattung, Service sowie Art der Beratung und Behandlung verschmelzen zu ihrer einzigartigen Handschrift. Auch die ganz persönlichen Vorstellungen von Work-Life-Balance, Effizienz und Freude ziehen in die Praxisräume ein.


Gleichzeitig erwarten heute auch Patient*innen mehr als nur den Standard – sie möchten sich verstanden, wohl und sicher fühlen.

Die KaVo uniQa als Herzstück der Praxis erfüllt exakt diese Ansprüche – technisch wie emotional. Intelligente Features, die gewohnte KaVo Präzision und hohe Wertigkeit unterstützen für lange Zeit den erfolgreichen Behandlungsalltag. Und gleichzeitig lässt die KaVo uniQa ausreichend Raum für den individuellen Ausdruck ihres Besitzers und unterstreicht seine unvergleichliche Uniqueness.

KaVo uniQa – wenn Dental Excellence einzigartig wird.

ECHT KaVo IN SEINER SCHÖNSTEN FORM.

Design, Präzision, Technologie und Usability bis ins Detail – dieser neue KaVo Standard ist einzigartig.

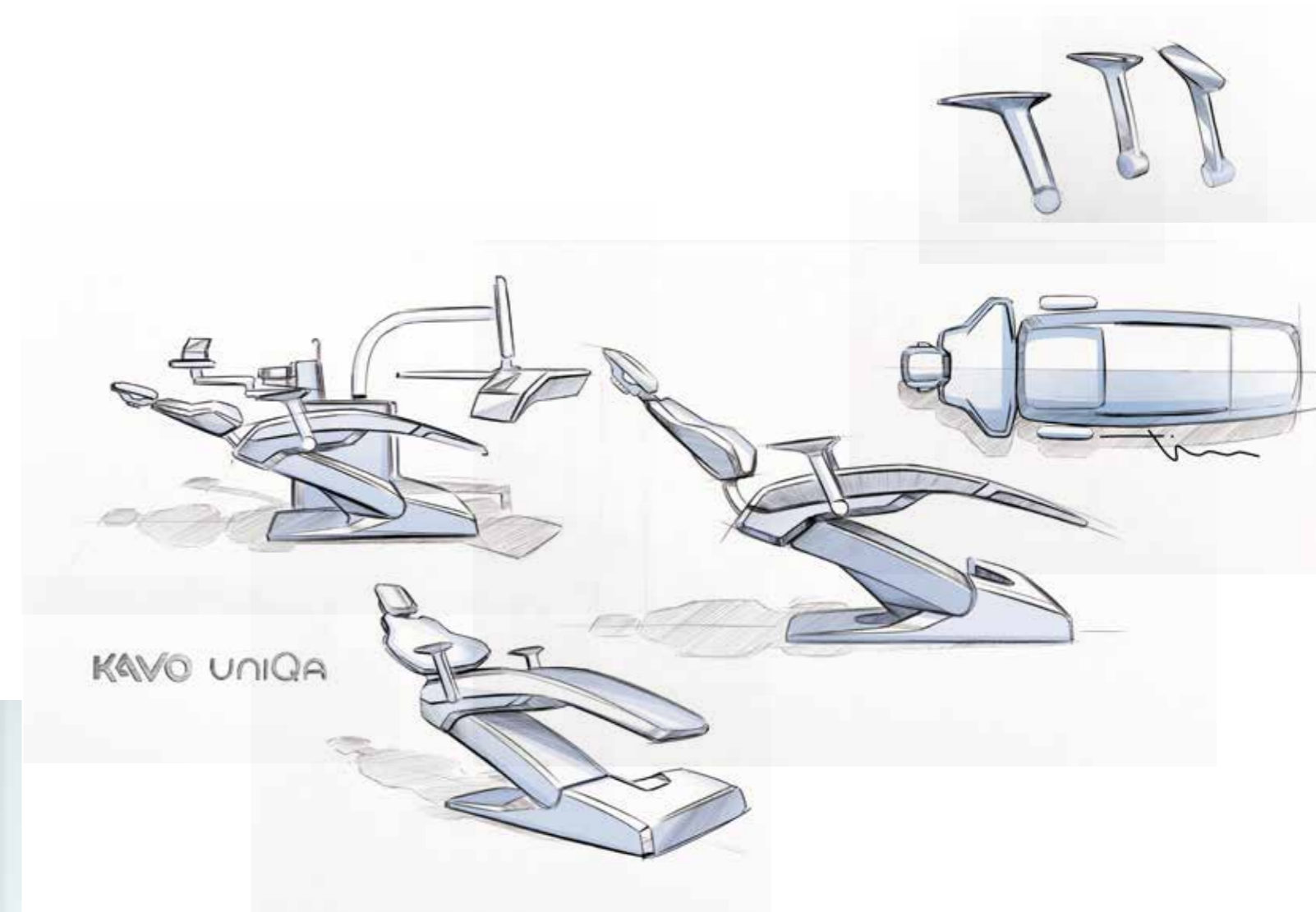

Nur mit klaren Zielen, viel Leidenschaft für die Sache, dem konsequenten Fokus an den richtigen Stellen zu optimieren und mit einer großen Portion Teamgeist entstehen intelligente, einzigartige Produkte. Produkte, die die Ansprüche der modernen Zahnarztpraxis erfüllen. Produkte, die Freude machen. Produkte, wie die neue KaVo uniQa.

Armin Imhof, Chief Technical Officer von KaVo und Jürgen Hinderhofer, Designer und Geschäftsführer von SLOGDESIGN, diskutieren im moderierten Gespräch, was genau die neue KaVo uniQa einzigartig macht – und geben spannende Einblicke hinter die Kulissen der Entwicklungs- und Designarbeit.



Was macht die neue KaVo uniQa aus Ihrer Sicht zu einer „echten“ KaVo Behandlungseinheit?

Armin Imhof (AI): Echt KaVo steht in erster Linie immer für Präzision, Anwenderfreundlichkeit, Wertigkeit, Zuverlässigkeit und natürlich auch für einen gewissen Grad an Digitalisierung. Ein KaVo Produkt ist ein Arbeitsmittel auf höchstem Niveau – und dieses Versprechen lösen wir auch wieder mit unserer neuen Behandlungseinheit KaVo uniQa ein.

Der Name uniQa beinhaltet den Anspruch einzigartig und unverwechselbar zu sein. Welche Kernaspekte würden Sie in diesem Zusammenhang besonders hervorheben?

AI: Wir haben mit der uniQa das bis dato gültige Premiumniveau ins Mittelpreissegment geholt. Die Features unserer neuen Behandlungseinheit gab es bisher nur im Hochpreissegment. Dabei haben wir uns während der Entwicklung auf vier zentrale Themen konzentriert: Den Patientenstuhl, die Hygienefunktionen, die Touch-Bedienung und natürlich das Design. Diese vier Aspekte bestimmen maßgeblich den unverwechselbaren Charakter der uniQa. Und natürlich stand auch der KaVo-typische Workflow im Mittelpunkt, um für die Zahnärzt*innen unnötige Umstellungen bei gewohnten und gut funktionierenden Abläufen zu vermeiden.

Jürgen Hinderhofer (JH): Auf der Designebene ging es primär darum, mehr Technik noch kompakter zu gestalten. Beispielsweise haben wir an vielen Bauteilen eine umlaufende Fase gestaltet, die das Volumen reduziert und präzise Kanten modelliert. Dies verleiht dem Produkt eine hohe Eigenständigkeit und visualisiert die bekannte KaVo Präzision.

AI: Zusammenfassend kann man sagen, dass wir trotz der vielen technologischen Besonderheiten ein intuitives, intelligentes „easy-to-use“-Konzept entwickelt und dieses mit einem hochwertigen Design und klarer, kompakter Formensprache kombiniert haben. Und dabei wurde Gutes und Bewährtes im Sinne einer Evolution übernommen, Neuerungen und Innovationen wurden clever implementiert. Das Gesamtpaket ist schlicht einzigartig – technologisch wie aus Design Sicht.

Zeit ist ein wertvolles Gut – auch in der Zahnarztpraxis. Ein effizienter Workflow und gute Usability sind entsprechend wichtige Kriterien für eine Behandlungseinheit. Wie gehen Sie bei KaVo mit diesen Themen um?

AI: Wir bei KaVo sehen uns in der Verantwortung, auf Effizienzfragen smarte Antworten für unsere Kundinnen und Kunden zu finden. Wir beobachten genau, wie Praxisteams arbeiten und versuchen Ihnen das Leben zu erleichtern. Ein vermeintlich kleines Beispiel sind hierfür die Magnetverschlüsse zum Einsetzen der Hygiene flüssigkeiten: Bei der uniQa übernimmt ein magnetisches System das Zentrieren und Einsetzen der Abdeckungen. Das sind Features, die nicht nur den Ablauf erleichtern und beschleunigen, sondern auch schlicht Freude machen. Und am Ende sorgen genau diese Kleinigkeiten für den entscheidenden Unterschied.

JH: Nicht zu vergessen sind auch die Hygieneaspekte – die Vermeidung von Fugen oder schlecht zu reinigenden Kanten begleiten und beschäftigen das Designteam während des ganzen Prozesses. Am Ende ist es immer die Summe aller gut gestalteten Details, die ein gelungenes, harmonisches Gesamtbild ergeben. Das ist auch Teil der Qualität.



ARMIN IMHOF

” Das Gesamtpaket ist schlichtweg einzigartig – technologisch wie aus Design Sicht. “

Sie sprechen das Thema Qualität an. Was macht gute Qualität aus Ihrer Sicht aus und wie zeigt sich diese bei der KaVo uniQa?

JH: Neben den angesprochenen Usability- und Hygienethemen sowie den technischen Features spielt natürlich auch die Haptik eine Rolle. Wie fühlen sich bspw. die Oberflächen oder auch die Instrumente an, wenn ich sie aus dem Köcher nehme? Wie empfinde ich das Polstermaterial? Eher unangenehm kalt oder matt-samtig mit einem gewissen Wellness-Charakter wie bei der uniQa? Über die haptische Ebene wird Hochwertigkeit im wahrsten Sinne spürbar. Entsprechend schließt sich gerade bei der Auswahl der Materialien der Kreis aus Funktionalität und Langlebigkeit sowie Wertigkeit und Design. Die Abdeckung benötigt zudem ein kratzfestes, chemisch resistentes und UV-stabiles Material, um Vergilben zu vermeiden. Und auch unter die



JÜRGEN HINDERHOFER

„ Fakt ist: Nachhaltige, langlebige Produkte benötigen außergewöhnlich hochwertige Materialien. So entsteht KaVo Qualität bis ins Detail. “

Abdeckung gehört Materialqualität – zum Beispiel wurden hier hochwertige Aluminium-Gussteile verbaut.

AI: Das stimmt. Langlebigkeit und Präzision sind das Ergebnis eines hochwertigen Produkts. Langlebigkeit sorgt für ein phänomenal gutes Preis-Leistungsverhältnis und so geringe Ausfallzeiten wie möglich. Präzision erleichtert die tägliche Arbeit, denn bei Arbeitsschritten, die man hundertfach am Tag wiederholt, ist präzise Funktionalität das A und O. Der Workflow muss auch im Sinne der Ergonomie leicht und zuverlässig funktionieren. Eine Behandlungseinheit steht bis zu 20 Jahre in einer Zahnarztpraxis – und unser Anspruch ist, dass sie jeden Tag Freude bereitet und die hohen Erwartungen des Praxisteams erfüllt.

Das Thema Individualisierung wird immer wichtiger. Inwiefern hat der Individualitätsanspruch Einfluss auf das Design?

JH: Individualisierung und Individualität lassen sich sehr gut im Design spiegeln. Individualisierung hängt unter anderem mit dem Thema Farbe zusammen. Farbe ist ein wichtiges Gestaltungselement und verleiht beispielsweise Räumen eine ganz eigene Grundstimmung. Dabei haben warme Töne eine andere Wirkung als kalte oder pastellige Farbwelten.

Wir nehmen immer öfter wahr, dass durchgängige Farbkonzepte in Zahnarztpraxen umgesetzt werden oder auch, dass unterschiedliche Praxisräume ein eigenes Farbkonzept erhalten und so differenziert werden. Auch hier gibt es viele unterschiedliche Ansätze für die Umsetzung der eigenen, individuellen Ideen und Vorlieben. Aber eine KaVo uniQa passt immer ins Bild und kann durch die Auswahl der Polster- oder auch der Lackfarben optisch individualisiert werden.

AI: Das ist genau der Punkt. Immer mehr Zahnärzt*innen erarbeiten ein durchdachtes Konzept für ihre Praxen, in die die Behandlungseinheiten eingebunden werden müssen. Das können Farbkonzepte sein, aber auch solche zu speziellen Themen wie beispielsweise „Ruhe“ oder „Natur“. Die uniQa steht symbolisch für die Einzigartigkeit und Individualität jedes einzelnen Zahnarztes – Körperbau und auch Arbeitsweisen unterscheiden sich von Mensch zu Mensch. Entsprechend gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten, die uniQa nach den eigenen Vorlieben flexibel zu konfigurieren. Als Premiumhersteller müssen wir in der Lage sein, passende Produkte anzubieten, die diese Anforderungen an den modernen Praxisbetrieb und an die moderne Zahnmedizin erfüllen.

ARMIN IMHOF

„ Als Premiumhersteller müssen wir in der Lage sein, passende Produkte anzubieten, die die Anforderungen an den modernen Praxisbetrieb und an die moderne Zahnmedizin erfüllen. “



JÜRGEN HINDERHOFER

„ Gutes Design ist stringent, unaufdringlich, ehrlich und bis ins letzte Detail durchdacht. Diese Attribute kommen am Ende immer auch bei den Patientinnen und Patienten an. “



Neben den Zahnärzt*innen rücken auch die Patient*innen zunehmend in den Fokus. Inwiefern hat das Design einer Behandlungseinheit auch auf sie Auswirkungen?

JH: Gutes Design ist stringent, unaufdringlich, ehrlich und bis ins letzte Detail durchdacht. Diese Attribute kommen am Ende immer auch bei den Patient*innen an. Die KaVo uniQa ist sympathisch beruhigend und strahlt Vertrauen aus. Die durchgängige, klare Gestaltung wirkt somit sicherlich auch in gewisser Weise psychologisch.

AI: Das ist exakt das Thema. Es geht darum, dass ein hochkomplexes Produkt, das tausende Funktionen hat, einfach im Sinne von reduziert wirkt. So gewinnt es eher einen Möbelcharakter. Gut sieht man das am Patientenstuhl, der sehr „aufge-

räumt“ wirkt – es gibt an ihm beispielsweise keine angeschraubten Elemente, aber dennoch hat er unzählige Funktionen. Und das war das Ziel: Nicht durch ein martialisches Design abzuschrecken, sondern Wohlfühlmomente durch das optische Erscheinungsbild zu erzeugen.

Wenn Sie abschließend in maximal drei Sätzen die KaVo uniQa beschreiben müssten – welche wären das?

AI: Übertroffene Ergonomie in ihrer schönsten Form bringt es für mich auf den Punkt: Die KaVo uniQa ist ein Premiumarbeitsgerät, das auch noch phänomenal gut aussieht. Diese zwei Ausprägungen, Ergonomie und Design, sind für mich aber auch grundsätzlich die Hauptunterscheidungsmerkmale einer KaVo Behandlungseinheit.



KaVo uniQa – die Highlights:

Der Patientenstuhl – Ergonomisch perfektioniert

1. Modernes, sportlich-kompaktes Stuhl-Design für ein Höchstmaß an Ergonomie
2. Höchstposition von 830 mm und Tiefstposition von 350 mm
3. Integrierte Trendelenburgbewegung für Ihre Patient*innen
4. Klare Linienführung durch das Kurvensegment mit seitlicher Armlehnenanbindung für einfachen Ein- und Ausstieg
5. Patientengewicht bis zu 185 kg

Das Arztelement – Berührend einfach

6. Intuitives Bedienkonzept mit schnellem und direktem Zugriff auf alle wichtigen Funktionen für zeitsparende und reibungslose Behandlungsabläufe
7. Vier Tisch-Versionen: von den kompakten, auch für Linkshänder geeigneten Varianten TM-, S-Tisch und Cart, zum noch edler anmutenden und noch ergonomischeren T-Tisch für Rechtshänder

Das Assistenzelement – Maximal flexibel

8. Fünf Instrumentenablagen, zwei Armlängen beim Standard- oder das optionale rechts/links-schwenkbare Assistenzelement zur Umwandlung in eine beidhändig nutzbare Behandlungseinheit
9. KaVo DIAGNOcam Vision Full HD: 3-in-1 Intraoralkamera zur perfektionierten Kariesdiagnostik in Full HD
10. Hochauflösende Screens: KaVo Screen HD in 22 Zoll und KaVo Screen One in 19 Zoll
11. CONEXIO: Datenschnittstelle für den Zugriff auf Patientendaten direkt an der Behandlungseinheit
12. Spielend leichte und vernetzungsunabhängige Patientenkommunikation mit der autarken Variante KaVo CONNECTbase

Hygiene – Effizient automatisiert

13. Komfortable Hygieneabläufe: Integrierte Spülprogramme, DEKAMat und OXYmat sowie das Hygienecenter mit integriertem, abnehmbarem Adapter für Instrumenten- und Absaug-schläuche zur zeitsparenden, automatisierten Reinigung und Desinfektion

Endodontie- und Chirurgiefunktion – Voll integriert

14. Endodontiefunktionen: Drei verschiedene Modi zur Feilensteuerung und erweiterbare Feilendatenbank mit knapp 200 voreingestellten Feilen
15. Chirurgiefunktion: Kleiner und komfortabel leichter Chirurgiemotor sowie integrierte Kochsalzpumpe

Accessoires – Perfekt kombiniert

16. Höchster Behandlungskomfort mit KaVoLUX 540 LED dank natürlichem Licht und gleichmäßigem Lichtfeld



FOLGEN SIE IHRER INTUITION.



Die selbsterklärende Bedienoberfläche des Arztelements mit hochwertigem Glas-Touchscreen macht es möglich: Sie finden sich sofort und unkompliziert zurecht. Und können sich über einen reibungslosen, zügigen und entspannten Arbeitsablauf freuen.

Mehr Freiheit – Für mehr Individualität

Das „One-size-fits-all-Prinzip“ war gestern: So individuell wie Sie sollte auch Ihre Behandlungseinheit sein. Richten Sie deshalb die Ausstattung Ihrer KaVo uniQa bis ins Detail auf Ihre ganz persönlichen Anforderungen aus. Durch die flexible Instrumentierung ist das völlig problemlos realisierbar: Bestücken Sie das Arzt- und Assistenzelement exakt so, wie es für Sie und Ihr Team stimmig ist. Viele Funktionen lassen sich individuell auf die Behandler*in einstellen, wie z. B. der Name, die Behandlungsarten oder die Direkttastenbelegung am Homescreen. Und sollte sich Ihr Behandlungsschwerpunkt verlagern – kein Problem.

Anpassungen sind auch nachträglich jederzeit möglich. Beispielsweise das Aufrüsten von fünf auf sechs Ablagen oder das Nachrüsten von Endodontie- und Chirurgiefunktionen.

Mehr Komfort – Für mehr Freude

Gönnen Sie sich Komfort: Per Touchdisplay oder Fußanlasser greifen Sie jederzeit bequem auf all die Funktionen und Parameter integrierter Spezialgeräte zu, die Sie während der Behandlung benötigen. Am Arztelement haben Sie dabei jederzeit alle Informationen im Blick. Programmieren Sie auch Ihre individuellen Behandlungsabläufe jederzeit nach Belieben.

Suchen Sie sich die Position für Ihr Arztelement, die für Sie angenehm ist. Im Sitzen oder auch im Stehen. Alleine oder mit Assistenz. Tisch-, Cart- oder Schwingenversion. So haben Sie stets alles komfortabel im Griff.

Mehr Konnektivität – Für mehr Flexibilität

Über die USB-Schnittstellen schließen Sie ganz einfach und wann immer Sie möchten weitere Geräte an. In Sekundenschnelle erkennt das uniQa Behandlungssystem von selbst, was Sie angeschlossen haben. So können Sie die Zukunft entspannt auf sich zukommen lassen.



Die uniQa Bedienoberfläche in drei Worten: übersichtlich, hygienisch, effizient.

Einfach abgelegt

Ob mit fünf oder sechs Instrumentenablagen: Jede Position lässt sich flexibel nach Ihren Wünschen konfigurieren. Oder Sie rüsten einfach später von fünf auf sechs Ablagen auf. Auch das geht mit der neuen KaVo uniQa problemlos.

Einfach gespeichert

Intelligent erinnert: Rufen Sie abgespeicherte Parameter für bis zu fünf Behandlungsarten für jedes Instrument schnell und zuverlässig erneut ab. Und zwar für bis zu sechs Behandler*innen – die KaVo uniQa macht es möglich.



Einfach komfortabel

Manchmal darf es ein Upgrade sein: Mit der T-Version erhöhen Sie Ihr Komfortlevel sogar noch, denn das Handling und die Zugänglichkeit des Arztelements wird mit dem T-Tisch für Rechtshänder zusätzlich vereinfacht. Das große Tray bietet eine erweiterte Ablagefläche, der Griff des Arztelementes ist abnehmbar und auch als sterilisierbare Variante erhältlich. Mit der KaVo uniQa wird eben vieles leichter.

Einfach überblickt

Schnelle und einfache Bedienung dank intuitivem Touchdisplay: Entnehmen Sie ein Instrument und erhalten Sie auf einen Blick alle wichtigen Informationen. So stört rein gar nichts Ihre Konzentration.

Smarte Spezialfunktionen – nicht nur für Spezialisten.



Auf die inneren Werte kommt es an – die Endodontiefunktion

Durch die integrierten Endofunktionen sparen Sie sich die Anschaffung eines teuren Endodontiegeräts: Mit drei verschiedenen Modi zur Feilensteuerung und dank der integrierten Feilendatenbank mit knapp 200 voreingestellten Feilen können Sie alle wichtigen Parameter wie Übersetzung und Drehmomentwerte direkt über das Arztelement einstellen, abrufen und abspeichern. Die Aufnahme zusätzlicher neuer Feilen ist jederzeit möglich. Das ist ein Endodontiepaket durchdacht bis in die Spitze.



Ganz schön helle – die clevere Chirurgieoption

Wenn Sie Ihre KaVo uniQa zusätzlich mit dem KaVo INTRA LUX S600 LED ausstatten, stehen Ihnen in Kombination mit den KaVo Chirurgieinstrumenten und der am Arztelement integrierten Kochsalzpumpe uneingeschränkt alle Funktionen eines modernen Chirurgiegeräts zur Verfügung. So machen Sie sich das Arbeiten so bequem wie möglich.



So stark kann leicht sein – Chirurgiemotor S600 LED

Der KaVo Chirurgiemotor S600 LED hat es in sich. 28 % leichter und 20 % kürzer als sein Vorgängermodell ist er einer der leichtesten und kleinsten Chirurgiemotoren auf dem Dentalmarkt. Ganz schön stark, der Kleine.

Ganzheitlich gedacht – mit integrierter Kochsalzpumpe


Effektive Entlastung und Komfort während der chirurgischen Behandlung – die direkt am Arztelement integrierte Kochsalzpumpe und der Halter für die Kochsalzlösung machen es möglich. Das ist 360° Chirurgiefunktionalität.



BEWAHREN SIE IHRE GESUNDE HALTUNG.



Beugen Sie mit der KaVo uniQa gesundheitlichen Problemen und Schmerzen vor. Praktizieren Sie so belastungsfrei wie möglich und in gesunder Körperhaltung. Erleben Sie die Freiheit natürlicher, intuitiver Abläufe. Und ermöglichen Sie auch Ihren Patient*innen jederzeit bequemes, entspanntes Liegen. Weil Gesundheit das höchste Gut ist.

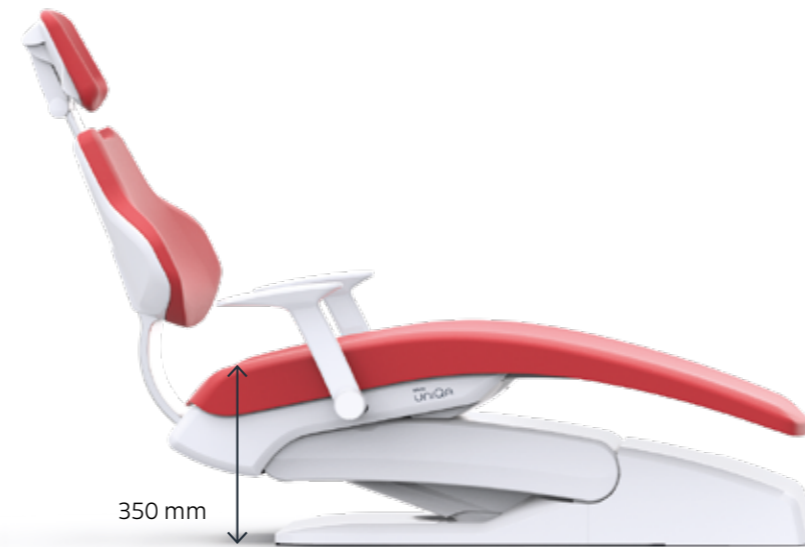

Tiefstposition von 350 mm und
Höchstposition von 830 mm



Zeigen Sie Größe

So individuell wie Sie, so flexibel ist die KaVo uniQa. Stellen Sie Ihre uniQa nicht nur auf Ihre persönlichen Anforderungen und Gewohnheiten ein, sondern auch auf Ihre Körpergröße. Die variable Höhe des Patientenstuhls liegt zwischen 350 mm und 830 mm, und gewährleistet so ergonomisch optimale Bedingungen, egal ob Sie im Sitzen oder Stehen behandeln. Damit Sie Ihre wahre Größe zeigen können.

Nutzen Sie Ihre neue Freiheit

Ab jetzt ist mehr Freiraum für Ihre Beine kein Problem mehr. Unter dem Patientenstuhl der KaVo uniQa bekommen Sie den Raum, den Sie benötigen. Positionieren Sie auch den Fußanlasser an der Stelle, die für Sie angenehm ist – das kompakte Design des Patientenstuhls und der Stuhltrittplatte machen es möglich. Für gesundes und entspanntes Arbeiten mit ausreichender Nähe zu Ihren Patient*innen. Für das gute Gefühl der Freiheit.



In bester Lage

Die Patientenlagerung der KaVo uniQa nach Trendelenburg ist in jeder Behandlungsposition gleichzeitig komfortabel und ergonomisch: Die Fußablage neigt und hebt sich automatisch passend zur jeweiligen Neigung der Rückenlehne. Diese kombinierte Bewegung verhindert eine Stauchung oder Streckung des Patientenrückens während der Neueinstellung der Rückenlehne. Die erhöhte Beinlagerung unterstützt dabei den Kreislauf. So behandeln Sie sprichwörtlich stets in bester Lage.



Ein- und Aussteigen, bitte – aber einfach

Die Armlehnen der KaVo uniQa erleichtern das Ein- und Aussteigen, denn diese sind einfach nach unten schwenkbar. Gleichzeitig bieten sie Halt und Sicherheit während der Behandlung ohne, dass Sie als Behandler*in auf maximale Bewegungsfreiheit verzichten müssen. Daher: Machen Sie es sich und Ihren Patient*innen ab jetzt bequem.

In perfekter Position

Finden Sie je nach Indikation oder Patientengröße mit dem flexiblen Wendepolster und der 2-Gelenk-Kopfstütze die perfekte Position, in der Ihre Patient*innen optimal liegen und Sie in ergonomischer Haltung entspannt und konzentriert arbeiten können. Gut für Sie. Gut für Ihre Patient*innen.

Reine Kopfsache

Durch den stufenlos einstellbaren Kopfneigungswinkel können Sie die Kopfstütze, und somit die Position von Kopf und Mund, optimal individuell einstellen. Auf dem Komfortkopfpolster liegen Ihre Patient*innen völlig entspannt – und Sie haben dauerhaft besten Zugang zur Ihrem Arbeitsfeld. Weil Komfort am Kopf beginnt.



*Optimierte Rückenlehne Progress: Optimale Arbeitshaltung und optimaler Zugang zum Mund der Patient*innen.*



Einfach komfortabel: die neue, einfach bedienbare 2-Gelenk-Kopfstütze mit Drucktaste und drehbarem Kopfpolster.

Links oder rechts? Beides richtig


Die KaVo uniQa steht für Individualität und Flexibilität. Natürlich ist sie entsprechend auch als Links- oder Rechtshändereinheit erhältlich. Egal wie Sie sich heute entscheiden, Sie können dies auch jederzeit rückgängig machen und neu wählen. Oder Sie entscheiden sich für die Kombination aus S-Tisch oder Cart mit dem rechts-/links schwenkbaren Assistenzelement und machen den einfachen Seitenwechsel permanent möglich. Das ist Investitionssicherheit à la KaVo.



Von Kopf bis Fuß auf Sie eingestellt.

Jeder Handgriff sitzt

Genießen Sie das gute Gefühl, mit idealen Greifwegen noch entspannter zu arbeiten. Ob Sie allein oder gemeinsam mit Ihrer Assistenz behandeln, das Arztelement der Tisch-, Cart- oder Schwingenversion sowie Trayablage und

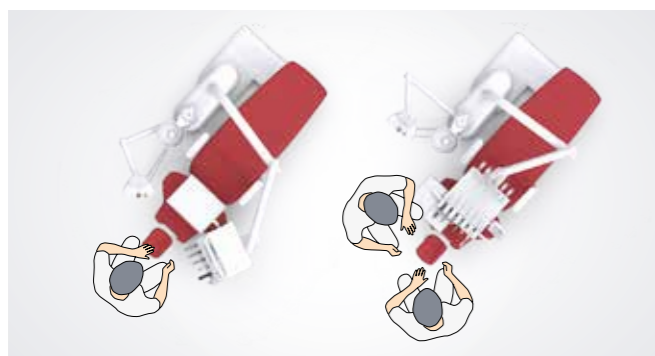

Assistenzelement lassen sich durch den großen Bewegungsradius passend für Sie positionieren. Für großen Freiraum bei der Behandlung mit der Schwingenversion sorgt die maximale Auszugslänge der Instrumentenschläuche von 90 cm und die geringe Tischhöhe von 45 cm.



Ihre Assistenz hat alles im Griff

Das Assistenzelement der KaVo uniQa ist mit einem kapazitiven Touchpanel und einer übersichtlichen Bedienoberfläche ausgestattet. Alle zentralen Stuhl- und Hygienefunktionen sowie die Funktionen der Behandlungsleuchte sind direkt und schnell verfügbar. Instrumente können einfach und exakt nach individueller Gewohnheit und Vorliebe platziert werden. Für das Plus an Hygiene sorgt die abnehmbare Instrumentenablage. Dazu die flexible Höhenverstellung und der große Schwenkbereich – das Assistenzelement ist Ergonomie pur.



Der perfekte Fußanlasser

Sie haben während der Behandlung alle Hände voll zu tun? Kein Problem mit der KaVo uniQa. Steuern Sie ab jetzt alle Funktionen und integrierten Geräte ganz einfach mit dem Fuß. Das gilt auch für Ihre Systemsoftware CONEXIO. Und ganz nebenbei sinkt zudem das Risiko von Kreuzkontaminationen. Für die noch flexiblere Platzierung optional auch als kabellose Variante erhältlich. Damit Sie alles perfekt steuern können.



Effizienter Workflow heißt vor allem eins: Das Prinzip der kurzen Wege.



Der zentrale Ausgangspunkt

Dreh- und Angelpunkt für Ihren optimalen Arbeitsablauf? Das KaVo Centro Träger system. Alle wichtigen Geräte sind sinnvoll und ergonomisch an einer Stelle angeordnet – so wird das kluge System zum Zentrum Ihrer Behandlungsprozesse, Greifwege und Bewegungsabläufe. Durch das Prinzip der kurzen Wege haben Sie jederzeit alles Notwendige parat. Bei der Um- und Aufrüstung auf weitere Geräte und zukünftige Technologien bleiben Sie dennoch absolut flexibel. Dank zahlreicher Adapter sind Geräte und Komponenten einfach und schnell austauschbar. Das bedeutet für Sie: Genießen Sie mit der KaVo uniQa Ihren optimalen Arbeitsablauf – denn was gibt es besseres als das gute Gefühl alles im Griff zu haben?

Individuell bestückbar für individuelles Arbeiten – das KaVo Träger system Centro

Intraorales Röntgen in Reichweite

Einfach mit einem Adapter das passende Kleinröntgengerät an der Leuchtaufbaustange installieren und Sie können direkt an der Behandlungseinheit eine optimal an die radiologische Indikation angepasste Röntgenaufnahme erstellen – hochpräzise, zeitsparend und ganz nah an Ihren Patient*innen. Unkomplizierter geht es kaum.




OPTIMALE PATIENTEN- KOMMUNIKATION IN IHRER HAND.



Nutzen Sie die Sprache der Bilder – klären Sie Ihre Patient*innen im Detail und anschaulich über notwendige Therapiemaßnahmen auf, indem Sie hochauflösende Befundaufnahmen und Bilder in brillanter Farbwiedergabe für Ihre Patientenkommunikation nutzen.

KaVo ProXam iCam – kleine Kamera einfach groß

Erläutern Sie Ihren Patient*innen die jeweilige zahnmedizinische Situation mit perfekten Bildern in hoher Tiefenschärfe und hervorragender Farbwiedergabe. Die leicht bedienbare KaVo ProXam iCam liefert Ihnen dafür jederzeit die optimale Aufnahme. Die Kamera ermöglicht es, bereits in einem Bildabstand von 9–35 mm ein scharfes Bild darzustellen und verfügt zusätzlich über einen Makromodus. Die Bildauslösung ist per Hand oder mit dem Fußanlasser möglich.

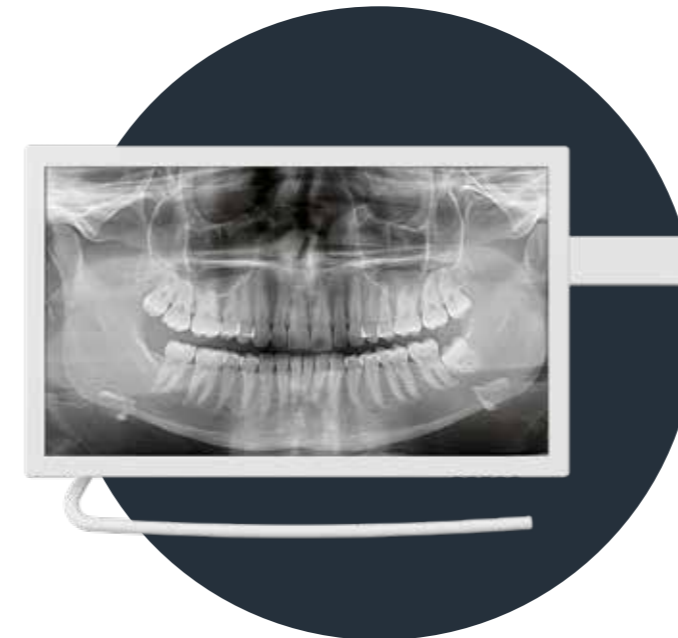

Zeigen Sie es Ihren Patient*innen

Beeindrucken Sie Ihre Patient*innen mit scharfen Bildern. Die KaVo Bildschirme bieten Ihnen z. B. hochauflösende Bildqualität, überzeugende Kontrastwerte und eine brillante Farbwiedergabe. Sie sind optimal abgestimmt auf alle Funktionalitäten der bildgebenden Geräte wie Kamera oder Mikroskop. Für höchste Hygienesicherheit hat der Screen eine Glasschutzscheibe, geringe Spaltmaße am Gehäuse und lässt sich mit nur einer Hand justieren. Einfach eine scharfe Sache!

KaVo Screen HD – die perfekte Wahl in Full HD

- Full-HD-True-Flatscreen
- Bildverhältnis: 16 : 9
- Bildschirmdiagonale: 22 Zoll
- Zwei digitale Eingänge für Mikroskop und PC

KaVo Screen One – die hochwertige Variante in HD

- HD-True-Flatscreen
- Bildverhältnis: 16 : 9
- Bildschirmdiagonale: 19 Zoll
- Zwei digitale Eingänge für Mikroskop und PC

DIAGNOcam Vision Full HD. Innovation in ihrer schönsten Form.

Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Kamera, die Ihnen drei klinisch relevante Bilder für Ihre Kariesdiagnostik liefert – jederzeit brillant scharf und in weniger als einer Sekunde. Dies ist ab jetzt möglich: mit der DIAGNOcam Vision Full HD.

Dreifache Diagnostik auf einen Klick

Egal ob Intraoral-, Transilluminations- oder Fluoreszenz-Aufnahmen: Die DIAGNOcam Vision Full HD liefert Ihnen alles in einem.

Bedienung über individualisierbare Touch-Panels

Die beiden Touch-Panels auf der Ober- und Unterseite der Kamera ermöglichen einfache Aufnahmen im Ober- bzw. Unterkiefer. Zudem sind die Funktionen frei an Ihre persönliche Arbeitsweise und an Links- bzw. Rechts-Händigkeit anpassbar.

Federleicht und perfekt ausbalanciert

Das geringe Gewicht und die perfekte Balance der Kamera ermöglichen eine ergonomische Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten.

Kombinierbare Aufnahme-Modi


Sie wählen, ob Sie eine Intraoral-, eine Transilluminations- oder eine Fluoreszenz-Aufnahme machen möchten – oder ob Sie zwei oder drei Aufnahmemodi kombinieren wollen.

Alle Aufnahmen in Full HD


Dank der HD-Auflösung von 1920 Pixel x 1080 Pixel werden alle aufgenommenen Bilder jederzeit in brillanter Schärfe dargestellt.

Auslösen nach Wunsch


Alternativ zum Touch-Panel oder der Maus am PC können Sie die Bildaufnahme auch ganz bequem mit der optionalen Fußsteuerung auslösen.

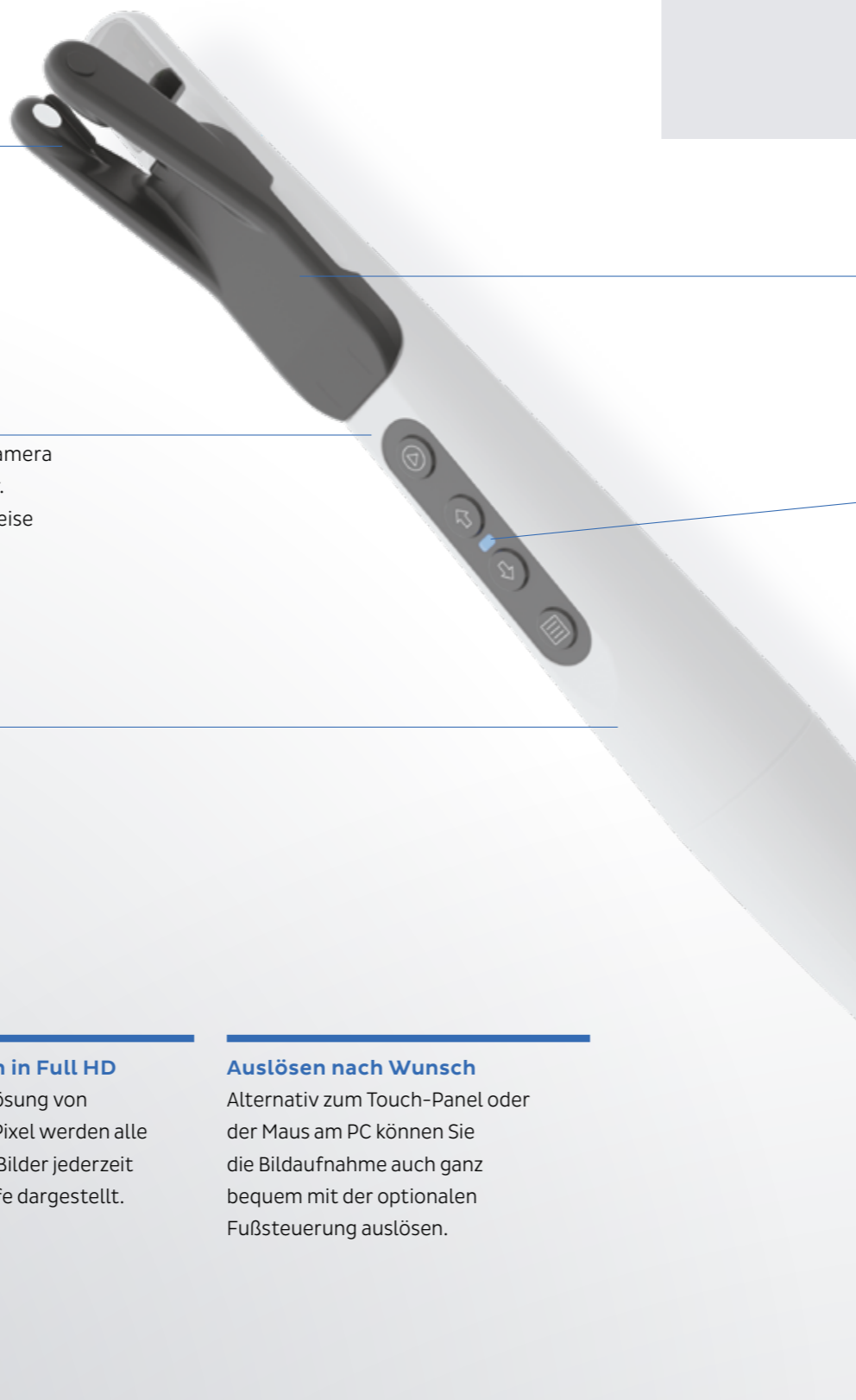


3 in 1

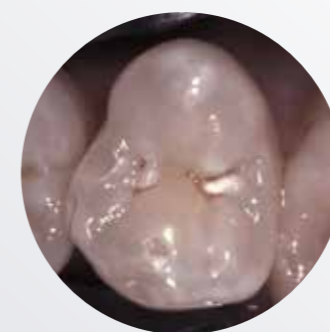

Intraoral-Aufnahme

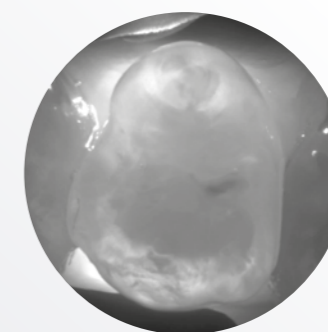

Transilluminations-Aufnahme

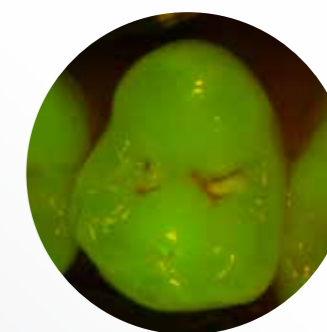

Fluoreszenz-Aufnahme

Mehr erkennen, alles zeigen: Dreifache Diagnostik auf einen Klick

Intraoralaufnahmen für die erste visuelle Kariesdiagnostik, tiefgehende Einblicke in die Zahnstruktur durch die Transilluminationstechnologie und Fluoreszenzbilder – das alles mit nur einer einzigen Aufnahme in Echtzeit und in Full-HD-Auflösung auf Ihrem Bildschirm.

Ein Tip für den gesamten Arbeitsablauf

Den Tip für die Transilluminationsaufnahmen können Sie auch für alle anderen Aufnahme-Modi verwenden. Dank des patentierten Designs des Tips sparen Sie sich damit die Zeit für den aufwändigen Aufsatzwechsel zwischen den Aufnahmen.

Einleuchtend einfache Bedienung

Die integrierte LED zeigt den Status der Kamera an: Weiß für „in Betrieb“, Blau für Standby, Rot für Fehlfunktionen.

Permanenter Autofokus



Jochen Kania
Zahnarzt

„Viele Kameras bieten eine Autofokus-Funktion. Doch meist dauert es zu lange, bis das Bild scharf gestellt ist, um eine klinisch relevante Aufnahme zu machen. Ganz anders der permanente Autofokus der DIAGNOcam Vision Full HD: Er ist immer eingeschaltet, ohne dass eine Taste gedrückt werden muss. Es wird jederzeit automatisch fokussiert – ich bekomme sofort, ohne zu warten, ein scharfes Bild.“

Das Ergebnis kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen: Man kann kaum ein Bild aufnehmen, das nicht perfekt scharf ist – in Full-HD-Qualität. Und das gilt unabhängig davon, ob die DIAGNOcam Vision Full HD als Intraoralkamera, für Transilluminations-Aufnahmen oder im Fluoreszenz-Modus eingesetzt wird – oder ob alle drei Modi in einer Aufnahme kombiniert werden.“



Die neue Basis für Ihre Patientenkommunikation – integriert, einfach und effizient.

KaVo CONNECTbase macht einen neuen, einfachen Workflow im Rahmen der Patientenkommunikation möglich – direkt an Ihrer KaVo uniQa und ganz ohne zusätzliche Softwareinstallation können Sie mit CONNECTbase Ihre Patient*innen über ihre dentale Situation aufklären. Sie schließen dafür einfach nur Ihre Kamera an und können sofort loslegen. Die Bilder werden unmittelbar am Bildschirm der Behandlungseinheit dargestellt und können sogar mit bereits gespeicherten Bildern verglichen werden.



Das Plug-and-Play-Prinzip – reibungslose Abläufe leicht gemacht

Durch die direkte Nutzung der Kameras an der KaVo Behandlungseinheit haben Sie im Handumdrehen Zugriff auf Ihre Kamerabilder und können diese im Anschluss via USB exportieren.

Ebenso einfach erfolgt die Bedienung über das Touch-Display oder den Fußanlasser Ihrer Behandlungseinheit, damit Sie Ihren Arbeitsplatz während der Behandlung nicht verlassen und auch Ihren Ablauf nicht unnötig unterbrechen müssen.

Sie wollen auf weitere Quellen zugreifen? Kein Problem. Durch einfaches Umschalten direkt am Arztelement können verschiedene HDMI Quellen am Bildschirm Ihrer Behandlungseinheit angezeigt werden.

Machen Sie Ihre Behandlungen zum Erlebnis

Überbrücken Sie Wartezeiten und schaffen Sie bei Bedarf eine willkommene Ablenkung für Ihre Patient*innen durch visuelle Erlebnisse direkt an der KaVo uniQa. Die tolle Auswahl verschiedenster Medien, wie bspw. einem personalisierbaren Willkommensbildschirm oder diversen Bildschirmschonern mit großer Fotoauswahl oder Slide-Shows, wird Ihren großen und kleinen Patient*innen Freude machen. Gleichzeitig können Sie Ihren Screen natürlich auch werbewirksam für Ihre individuellen Themen nutzen und relevante Informationen einfach übermitteln – ganz KaVo uniQa eben.



Passend zum Design Ihrer Praxis sind verschiedenste Themen für Ihren Bildschirmhintergrund verfügbar.



Die einfache Verknüpfung Ihrer Praxis-Management-Software.

Mithilfe der neuen CONNECTlink Software kann Ihre Praxis-Management-Software mit der KaVo Behandlungseinheit verbunden werden, wodurch eine schnelle und einfache Übergabe von Patientendaten und klinischen Bildern ermöglicht wird. So haben Sie direkt am Touch-Display am Arztelement der KaVo Behandlungseinheit Zugriff auf alle relevanten Daten und können wie gewohnt neue klinische Bilder mit den KaVo Kameras hinzufügen. Diese Bilder werden dank CONNECTlink automatisch an die Praxis-Management-Software übertragen und der jeweiligen Patientenakte zugeordnet.

Die neue CONNECTlink Software kann als separates Modul zu Ihrem bestehenden CONNECTbase Patienten-kommunikationssystem erworben werden. Für die Nutzung der CONNECTlink Software wird CONNECTbase sowie die entsprechende CONNECTlink Lizenz an der jeweiligen KaVo Behandlungseinheit benötigt.



CONEXIO verbindet, was zusammengehört.

Eine einzigartige KaVo Bedienphilosophie macht es möglich: CONEXIO ebnet den Weg für mehr Effizienz im Praxisalltag. Die KaVo Software vereint Patientenmanagementsoftware, 2D-Röntgenbildarchiv und intraorale Livebilder und bietet schnellen, intuitiven Zugang. Über das Touchdisplay der KaVo uniQa greifen Sie direkt auf alle Patientendaten zu. Sie möchten weitere Daten hinzufügen? Kein Problem. Und das Beste: Sie werden direkt der Patientenakte zugeordnet.

Hilfreich für Ihre Befundung – Lehrreich für Ihre Patientinnen und Patienten

Nutzen Sie die Möglichkeit, Bilder aus unterschiedlichen Quellen auszuwählen und zu vergleichen. Für die Kommunikation mit Ihren Patient*innen benötigen Sie nur das Arztelement Ihrer KaVo uniQa – ganz ohne Tastatur, Maus, Tablet oder PC.



Perfekter Überblick: Der klinische Überwachungsstatus

Jedes Bild kann bei der Befundaufnahme einem Zahn zugeordnet werden. Dabei können Sie einen klinischen Überwachungsstatus von „gesund“ bis „kritisch“ festlegen. Der Vergleichsmodus gibt Ihnen die Möglichkeit, noch während der Befundung eine Verlaufskontrolle mit älteren Bildern des Zahnes oder auch Bildern aus anderen Quellen durchzuführen.



Ein Behandlungskonzept mit Hand und Fuß

Mit CONEXIO ist alles genau da, wo Sie es benötigen: Direkt an Ihrem Arztelement der KaVo uniQa. Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche über das Touchdisplay der uniQa gewährleistet dabei vollen Zugriff auf die Patientenakte. Und wenn Sie mal keine Hand frei haben: Alle zentralen CONEXIO Funktionen lassen sich auch über den Fußanlasser steuern und aktivieren. Ganz bequem und hygienisch.




Vergleich KaVo Patientenkommunikationssysteme

	KaVo CONNECTbase	KaVo CONNECTlink	KaVo CONEXIO
Produktbeschreibung	Autarkes System – Integriert in Ihrer KaVo Behandlungseinheit	Software-Installation auf dem Hinterkopf-PC Erweiterung Ihrer CON-NECTbase*	Software-Installation auf dem Hinterkopf-PC
Software-Installation auf PC notwendig?	Nein	Ja	Ja
Automatische Integration Ihrer Praxis-Management-Software	Nein	Ja	Ja
Verfügbarkeit Medien (z.B. Bildschirmschoner, KaVo Themen, Willkommensbildschirm)	Ja	Ja	Nein
Quellenumschaltung direkt am Arztelement der Behandlungseinheit	Ja (2x HDMI)	Ja (PC-Inhalt)	Nein
Bilddarstellung direkt am Bildschirm der Behandlungseinheit	Ja	Ja	Ja
Bildvergleiche mit historischen Bildern	Ja	Ja	Ja
Automatische Bildübertragung	Ja	Ja	Ja
Bedienung	• Touch-Display Arztelement • Fußanlasser Behandlungseinheit	• Touch-Display Arztelement • Fußanlasser Behandlungseinheit • PC (Maus, Tastatur)	• Touch-Display Arztelement • Fußanlasser Behandlungseinheit • PC (Maus, Tastatur)
Anschluss Kameras	• KaVo ProXam iCam • KaVo DIAGNOcam Vision Full HD	• KaVo ProXam iCam • KaVo DIAGNOcam Vision Full HD	• KaVo ProXam iCam • KaVo DIAGNOcam Vision Full HD
Remote Zugriff + Update Behandlungseinheit	Ja (LAN)	Ja (LAN)	Nein

* Ihre CONNECTbase kann auch weiterhin wie gewohnt als autarkes System genutzt werden. Möchten Sie die CONNECTbase mit Ihrer Praxis-Management-Software verknüpfen, kann die CONNECTlink Software sowie die entsprechende Lizenz für Ihre KaVo Behandlungseinheit erworben werden.

HYGIENE LEICHT GEMACHT.

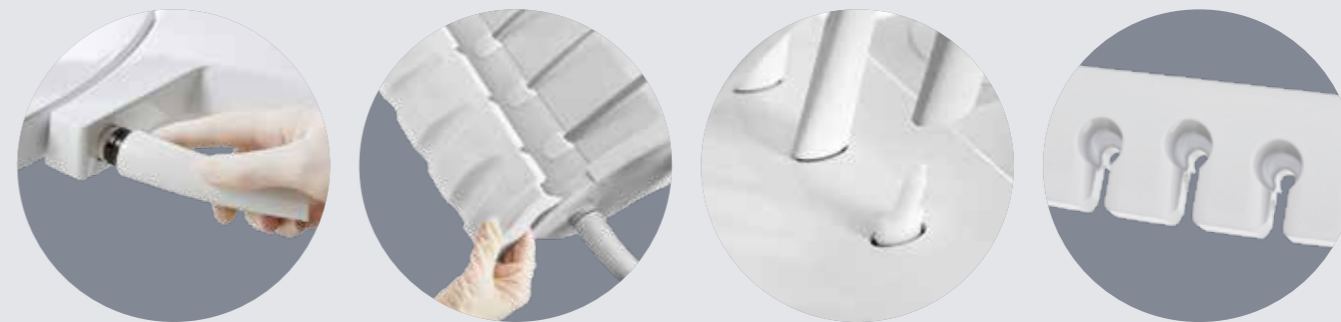

Griffe, Instrumentenablagen, Mundspülbecken, Schwingenbügel und Silikonmatten sind einfach abnehm- und desinfizierbar. Damit kein Schmutz in Ihre Behandlungseinheit eindringt, sind Gehäuseober- und -unterteil komplett geschlossen. Die Saugfilter sind dank Hygienegriff einfach und sicher wechselbar.



Wenn aus praktischer Intelligenz sichere Hygiene wird

Setzen Sie auf die zuverlässige, automatische Reinigung und Desinfektion der Absaug- und Instrumentenschläuche. Das Hygienecenter ist im Gerätekörper der KaVo uniQa integriert. Hier können Sie sowohl Saugschläuche als auch Instrumentenschläuche anschließen – ganz einfach und ohne großen Aufwand. Das Hygienecenter ist abnehm- und thermodesinfizierbar.

Die Kraft des Wassers

Reinigung mit der Kraft des Wassers. Bei der KaVo uniQa ist das automatisierte HYDROclean-Programm zur mühelosen Reinigung der Amalgamabscheide-, Saug- und Abflusssysteme automatisch mit den Instrumentenspülprogrammen kombiniert. So vermeiden Sie Ausfallzeiten und Kosten für die Wartung Ihrer Behandlungseinheit.



Die Reinigung Ihrer KaVo uniQa ist denkbar einfach: Nehmen Sie zum Desinfizieren wichtige Bestandteile mühelos ab. Sämtliche Oberflächen sind leicht zu säubern und das Spülen der Instrumenten- sowie die Reinigung und Desinfektion der Absaugschläuche ist automatisiert. Das garantiert Sicherheit auf allen Ebenen.




So hat Verkeimung keine Chance

Schützen Sie die Leitungen Ihrer KaVo uniQa vor Verkeimung. Der Wasserblock mit freiem Wassereinfluss erfüllt die hohen Maßstäbe der DVGW-Norm. Darüber hinaus sorgt die Dauerentkeimung mit KaVo OXYGENAL 6 dafür, dass sich im normalen Praxisbetrieb keine Mikroorganismen ausbreiten. Mit dem Intensiventkeimungsprogramm

(Reinigungsprogramm „Wöchentlich“) schützen Sie nicht nur Ihre Patient*innen vor Mikroorganismen, die sich in Stagnationszeiten wie an Wochenenden oder zu Urlaubszeiten bilden können, sondern sorgen auch für eine einwandfreie Qualität der Kühl- und Spülflüssigkeiten. Für Sicherheit zu jeder Zeit.

Automatische Spülprogramme nach RKI

Minimieren Sie Risiken nach RKI Vorgaben – mit den vorprogrammierten Reinigungsprogrammen wird die Aufbereitung Ihrer KaVo uniQa ein Kinderspiel. Egal, ob morgens, nach jeder Behandlung, abends oder wöchentlich. Im Hygiene Tab wird Schritt für Schritt erklärt, wie die Einheit vorzubereiten ist. Für die Spülung und Reinigung sorgen die Programme dann ganz von allein.

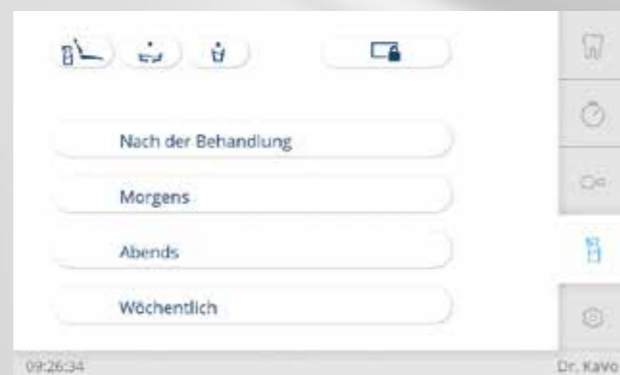

Geschütztes Wasserversorgungssystem

Mit dem Rücksaugstopp an KaVo Instrumenten und Motoren schützen Sie Ihr Wasserversorgungssystem. Damit wird verhindert, dass kontaminiertes Spraywasser in die Behandlungseinheit gesaugt wird.



Sparen Sie Zeit mit dem anwendungsfertig gemischten KaVo DEKASEPTOL Gel. Das direkt einsetzbare Gel benetzt Absaugschläuche und -systeme und haftet an den kritischen Stellen, anstatt einfach nur durchgespült zu werden.



Die reinste Freude

Für die standardisierte, effektive Reinigung und Desinfektion der Absaugwege ist beim DEKAmat die DEKASEPTOL Flasche im Gerätekörper integriert. Ebenso mühelos funktioniert die Permanent- und Intensiventkeimung des Patientengewässers beim OXYmat, denn auch die OXYGENAL 6 Flasche ist im Gerätekörper platziert. Die Abgabe des jeweiligen Mittels erfolgt automatisch in der perfekten Dosierung. Damit entfallen das personal- und zeitintensive manuelle Aufbereiten sowie die Gefahr der Falschdosierung. Zudem wird der Kontakt mit den Chemikalien vermieden.

IHR UNIKAT IN ZUBEHÖR & AUSSTATTUNG.



Machen Sie Ihre KaVo uniQa zu Ihrem persönlichen Unikat: Kombinieren Sie mit dem Mix und Match Prinzip Zubehör ganz individuell – für mehr Individualität und Freude während der Arbeit.



Kraft und Leistung in perfekter Balance

Mit dem PiezoLED Ultraschall-Scaler wird Ihre Zahnreinigung hochpräzise und zeitsparend: Linear schwingende Titansonotroden sorgen für eine besonders effektive Behandlung. Zähne und Zahnfleisch bleiben auch in filigranen Bereichen unberührt, da Ihnen zirkuläre Lichtemissionen eine optimale Sicht ermöglichen. Durch das leichte, ergonomische Design arbeiten Sie ermüdungsfrei und extrem exakt.

Das KaVo SONICflex ist das Universalgenie für fast alle Indikationen: Dank seiner vielfältigen Möglichkeiten könnte es eines Ihrer am meisten eingesetzten Instrumente sein: Mit über 50 Spitzen, die sich mit nur einer Umdrehung wechseln lassen, ist es perfekt für sämtliche Anwendungsbereiche wie z. B. Prophylaxe, Endodontie, Parodontologie, minimalinvasive Kariestherapie, Chirurgie oder Präparation.

Leben Sie Ihren Anspruch

Geben Sie sich auch bei der Instrumentierung nur mit dem Besten zufrieden: Die KaVo MASTERmatic Serie deckt sämtliche Einsatzbereiche ab, bietet Ihnen beste Sicht sowie optimalen Zugang zur Kavität – damit Sie stets mit allerhöchster Qualität und Präzision behandeln können. Speziell in Kombination mit dem extrem kompakten, leichten und lauffruhigen Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED arbeiten Sie dank SMARTdrive im gesamten Drehzahlpektrum von 100 bis 40.000 U/min besonders effizient und ermüdungsfrei.



Perfektes Licht für beste Sicht.

Bedienen Sie die KaVoLUX 540 LED über das intuitive Arztelement oder über die berührungslose Gestensteuerung. Das Ein- und Ausschalten ist auch über die Automatikpositionen Ihrer KaVo uniQa möglich. Optimal auf Ihre uniQa abgestimmt, bietet die KaVoLUX 540 LED perfekte Hygienevoraussetzungen, höchste KaVo Qualität, lange Lebensdauer und maximalen Behandlungskomfort.



Beste Sicht für optimale Verarbeitung

Ein häufiges Problem: Wird die Behandlungsleuchte nicht gedimmt, härtet Komposit desweilen zu schnell aus. Nicht so mit der KaVoLUX 540 LED. Der innovative COMPOsave™ Modus (kompatibel mit lichtaktivierbaren Restaurationsmaterialien) filtert sämtliche Blauanteile des Lichts heraus und verlangsamt so das Aushärten des Füllmaterials. Ohne dass Sie das Licht dimmen müssen, können so lichthärtende Materialien entspannt bearbeitet werden. Bei einer Helligkeit von 15.000 Lux haben Sie stets beste Sicht für Ihre optimale Behandlung und hervorragende Ergebnisse in Serie.

Natürliches Licht in höchster Qualität

Berührungslose Bedienung

COMPOsave Modus



Der perfekte Sitz.

Für Sie als Zahnärzt*in ist es besonders wichtig, eine dauerhaft ergonomisch gesunde und komfortable Körperhaltung in jeder Behandlungssituation einzunehmen. Nichts beeinflusst Ihre Körperhaltung so sehr wie der Arbeitsstuhl, auf dem Sie täglich Platz nehmen. So ist der KaVo PHYSIO Evo und Evo F exakt auf die Bedürfnisse und Arbeitsabläufe von Zahnärzt*innen und Assistent*innen ausgerichtet.



Ergonomie und Komfort bis ins Detail

Passen Sie die Sitzfläche und Rückenlehne individuell auf Ihre anatomischen Anforderungen und Ihren Behandlungsstil an – dank getrennter Einstellfunktionen kein Problem. Rücken- und Sitzpolster des KaVo PHYSIO Evo sind ergonomisch geformt. Die zentrierte Erhöhung im Sitzpolster bietet einen stabilen Sitz und verhindert Verrutschen selbst bei schnellen, kurzen Rollbewegungen. Die abgerundete Oberschenkelauflage schenkt Ihnen viel Bewegungsfreiheit. Dank der federkraftunterstützten Rückenlehne wird Ihre Rückenmuskulatur insbesondere im Lendenwirbelbereich permanent aktiv gestützt und so dauerhaft geschont. Reibungslose Arbeitsabläufe und größtmöglicher Sitzkomfort werden damit bei jeder Behandlung selbstverständlich – für Ihre Gesundheit und beschwerdefreies Arbeiten.

Ein ausgezeichnetes Konzept

Der Behandlungsstuhl KaVo PHYSIO Evo ist mit dem Gütesiegel des Vereins „Aktion gesunder Rücken“ (AGR) ausgezeichnet. Eine unabhängige, multidisziplinäre Expertenkommission legt dieser Auszeichnung strenge Prüfkriterien für Ergonomie und Gesundheit zugrunde.




Ausstattungsoptionen

	TM	S	C	T		TM	S	C	T
Patientenstuhl					Polymerisationshandstück Satelec MiniLED	○	○	○	○
Softpolster	●	●	●	●	Trayhalter für Tablettaufnahme	○	○	○	○
RELAXline Softpolster	-	-	-	-	Schwenk- und höhenverstellbar	●	●	●	●
Rückenlehne					Abnehmbare Instrumentenablage	●	●	●	●
Progress (optimiert)	●	●	●	●	Selektivablage	●	●	●	●
Kopfstütze					Kurzer Arm	x	x	x	x
2-Gelenk mit Drucktaste	●	●	●	●	Rechts/links schwenkbar	○	○	○	○
Komfortkopfpolster	○	○	○	○	Gerätekörper				
ArMLEHNE					Mundspülbecken Porzellan	●	●	●	●
Links	○	○	○	○	Mundspülbecken Glas Rauchgrau	○	○	○	○
Rechts	○	○	○	○	Hygiene-Center	●	●	●	●
Arztelement					Dauerentkeimung ¹	●	●	●	●
Touchdisplay	●	●	●	●	Intensiventkeimung ¹	●	●	●	●
SMARTdrive	●	●	●	●	HYDROclean (Spülsystem)	●	●	●	●
5 Instrumentenablagen	●	●	●	●	DEKAmat™ und OXYmat	●	●	●	●
6 Instrumentenablagen	○	○	○	○	Warmwasserboiler	●	●	●	●
Abnehmbare Instrumentenablage	●	●	●	●	VACUstopp	●	●	●	●
Turbinenschlauch	○	○	○	○	Kabelloser Fußanlasser	○	○	○	○
INTRA LUX Motor KL 703 LED™	○	○	○	○	Versorgungssystem				
Integrierte Drehmomentsteuerung (Endo)	○	○	○	○	Wasserblock DVGW	●	●	●	●
PiezoLED™ Ultraschall Scaler	○	○	○	○	Wasserflasche DVGW ²	○	○	○	○
SONICflex™ Schall Scaler	○	○	○	○	Wasserblock kompakt ²	○	○	○	○
Dreifunktionshandstück	x	x	x	x	Zusatzgeräteanschluss	○	○	○	○
Minilight Dreifunktionshandstück	x	x	x	x	Unterdruckregelventil	○	○	○	○
Mehrfunktionshandstück	○	○	○	○	CENTRAmat	○	○	○	○
Physiologische Kochsalzlösung	○	○	○	○	Entsorgungssystem				
Chirurgiemotor S600 LED	○	○	○	○	Externe Nassabsaugung	●	●	●	●
Sprayerwärmung für Instrumente	●	●	●	●	DÜRR Amalgamabscheider	○	○	○	○
USB-Schnittstelle	○	○	○	○	DÜRR Separierautomatik	○	○	○	○
Pneumatische Bremse für Armsystem	-	○	-	○	Behandlungsleuchte				
Tablettaufnahme für zwei Norm-Trays	●	●	-	●	KaVoLUX 540 LED	○	○	○	○
Servicetisch 1568 für zwei Norm-Trays	-	-	○	-	Leuchtaufbaustange	○	○	○	○
Assistenzelement					Adapter für Leuchtaufbaustange (z.B. für Intraorales Röntgen)	○	○	○	○
Kapazitives Touchpanel	●	●	●	●	Patientenkommunikation				
5 Instrumentenablagen	●	●	●	●	KaVo CONNECTbase	○	○	○	○
Spraynebelabsaugung	●	●	●	●	CONEXIO	○	○	○	○
Speichelzieher	●	●	●	●	KaVo Screen One	○	○	○	○
2. Speichelzieher	○	○	○	○	KaVo Screen HD	○	○	○	○
Dreifunktionshandstück	○	○	○	○	KaVo ProXam iCam	○	○	○	○
Mehrfunktionshandstück	○	○	○	○	KaVo DIAGNOcam Vision Full HD	○	○	○	○

● Serienausstattung | ○ Optionale Ausstattung | x Muss gewählt werden | - Nicht lieferbar
¹ nur in Verbindung mit Wasserblock DVGW und Wasserflasche DVGW | ² gegen Minderpreis

Lackfarben metallic

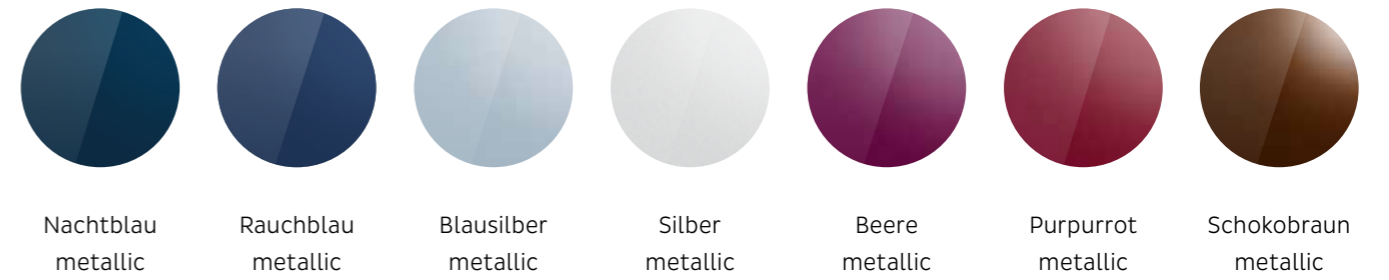


Lackfarben uni




Bitte beachten: Druckfarben geben die Oberfläche nicht farbgetreu wieder. (KaVo Farbkarte anfordern!)




Polsterfarben: exklusiv für KaVo uniQa

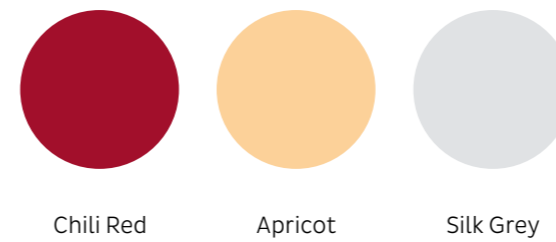

RELAXline Softpolsterfarben

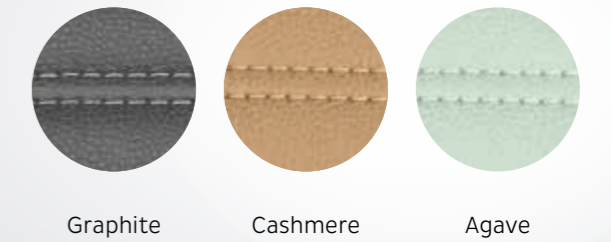

Polsterfarben

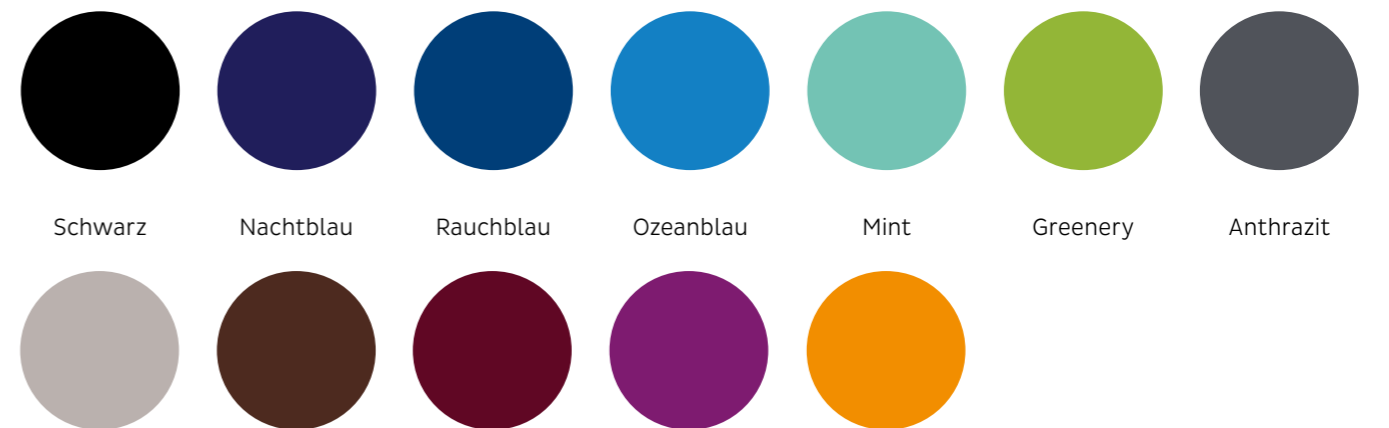

Dental Excellence in jedem Bereich



Praxisausstattung

KaVo Behandlungseinheiten, Behandlungsleuchten, Behandlerstühle, Patientenkommunikationssysteme und weiteres Zubehör für die zahnärztliche Praxis



Instrumente

Dentale Hand- und Winkelstücke, Turbinen, Pulverstrahlhandstücke und Kleingeräte für alle Anwendungsgebiete von Diagnostik über Prophylaxe bis hin zu Restauration, Chirurgie, Endodontie und Instrumentenpflege



Röntgen

Intraorale Strahler, Sensoren und Speicherfolien, Panorama- und Fernröntgen, sowie dedizierte DVT Geräte für jede Indikation in der Zahnmedizin.

Die in diesem Katalog gezeigten und beschriebenen Produkte und Ausstattungen sowie Dienstleistungen sind nicht in allen Ländern erhältlich. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. KaVo Dental GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für Abweichungen in Farbe und Form von den Abbildungen, Irrtümer sowie Druckfehler und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Prospekten vorzunehmen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der KaVo Dental GmbH.

KaVo und uniQa sind eingetragene Marken der KaVo Dental GmbH.